


キャットベリ専用加温器

乾式ホットパックをスッキリ・タツプリ 適温保管 スライドトレー式加温器

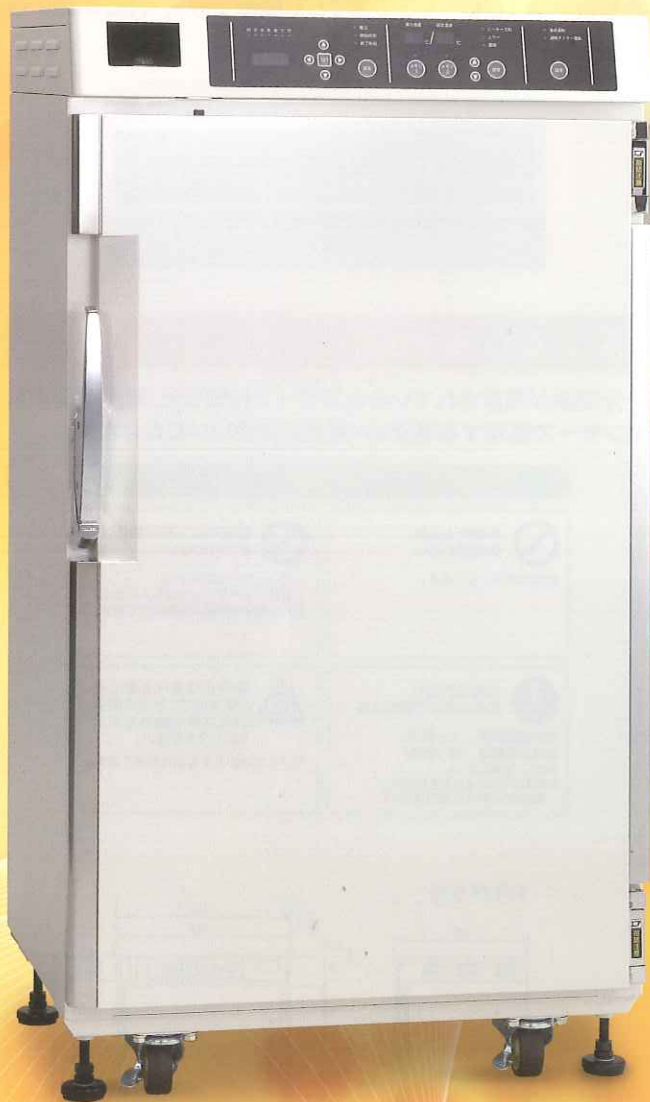

肩用



スタンダードタイプ



首用



膝用

NEW

コストダウンを実現

潜熱を活用しているNew乾式ホットパックだから大幅なランニングコストの削減を実現しました。

	New乾式ホットパック	湿式ホットパック
付帯設備投資	特になし	水周り設備(給水・排水・流し等)
ランニングコスト	・人件費:約0.3人/台 ・光熱費:使用中の電気料のみ ・電気使用量:700VA	・人件費:約1人/台(推定) ・光熱費:電気料+水道料 ・電気使用量:約1400~1100VA
ホットパック耐久性	約5年	約6ヶ月
付帯作業	特になし	層内加熱水の入替え作業(週1~3回)

使い易さバツグン。 乾式ホットパック「Cat-belly」を加熱し、 適温に保つ専用の加温装置が新登場！

1 取り出しやすい引出式トレー

使い易さにこだわった引出式トレーを採用することで、手軽に出し入れできるようになりました。しかもホットパックを整理して並べることで標準パックが24枚まで収納可能となりました。



2 イージーメンテナンス

引出トレーは取り外し可能で、庫内のメンテナンスが容易に可能となりました。



カゴA



カゴB

3 これは便利！週間タイマー運転機能を搭載

曜日ごとに運転開始時間と終了時間を設定できるため、診療時間に合わせて効率よく使用できます。

4 温度設定は任意で設定可能！

温度設定は75℃～95℃まで5℃間隔で設定可能。季節に合わせて適温に保つ事ができます。



5 安心・安全設計

2分間扉が開放されているとブザーでお知らせ、温度の異常はセンサーで感知する等安心・安全にお使いいただけます。

注意

⊘ 本機の上には物を置かない
故障の原因になります。

⊘ 運転中に下記の操作は
おこなわない
・ブレーカーをOFFする。
・電源コードをコンセントから抜く。
思わぬ事故や故障の原因になります。

! 本機は下記の条件において使用する
使用温度範囲 5～35℃
使用湿度範囲 15～85%
※但し、結露なきこと
※温度35℃のときは湿度48%以下
湿度85%のときは温度28℃以下


⚠ 動作中は庫内が熱くなり
ますので、カゴの取手
以外は手を触れないよ
うにしてください。
やけどやけがをする恐れがあります。

仕様

品名	加温器(付属品 カゴA:2個 カゴB:2個 含む)
型式	YS-KA01-1
定格	単相交流100V 周波数50/60Hz
電源入力	700VA
外形寸法	幅655mm×奥行500mm×高さ1200mm
庫内寸法	幅540mm×奥行412mm×高さ896mm
重量	本体100Kg+カゴ10Kg 合計110Kg
設定温度範囲	75℃～95℃
ホットパック収納枚数	YS-ST(標準タイプ)24枚
安全装置	過熱防止バイメタル、過熱防止サーミスタ、過熱防止サーモスタッド、漏電ブレーカー、電流ヒューズ、扉開閉検査センサ
電流ヒューズ	型番:FGBO-A PbF 定格:125V、10A 特性:B種溶断型 寸法:φ6.4×30mm JIS C 6575-2準拠品
一般的名称	湿式ホットパック装置
薬事届出番号	27B2X00001000062
医療機器クラス	一般医療機器
EMC適合	JIS T 0601-1-2:2002
使用環境条件	温度5℃～35℃、湿度15～85% (但し、結露なきこと) ※温度35℃の場合、湿度48%以下 湿度85%の場合、湿度28℃以下 標高 0～2000m
保管条件	温度5℃～35℃、湿度15～85% (但し、結露なきこと) ※温度35℃の場合、湿度48%以下 湿度85%の場合、湿度28℃以下 標高 0～2000m

(販売店)

外形寸法

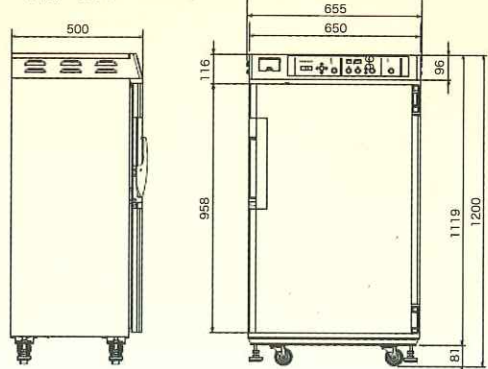

(薬事届出番号)27B2X00001000062

発売

YAMAICHI
YAMAICHI CO.,LTD. 山一株式会社

〒550-0001 大阪市西区土佐堀1丁目4番11号
TEL.06-6447-5943 FAX.06-6443-8069

製造販売業者 湯山製作所

豊中市名神口3丁目3番22号
TEL(06)6332-2581(代) FAX(06)6333-2772

【医療機器製造販売業許可番号】 27B2X00001
【医療機器製造業許可番号】 27BZ001333 第二工場